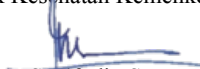


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman
PENGUNAAN ROTATOR VRN 200			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Rotator VRN 200		
Ruang Lingkup	Laboratorium Hematologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. ROTATOR VRN 200		
Fungsi	Sebagai alat untuk menghomogenkan sampel whole blood		
Instruksi Kerja	1. Hubungkan kabel daya alat ke stopkontak listrik yang stabil. 2. Tekan tombol ON atau saklar utama untuk menyalakan mesin 3. Letakkan sampel atau tabung reaksi dengan posisi seimbang di atas wadah atau platform rotator. 4. Atur kecepatan putaran (speed) sesuai kebutuhan analisis. 5. Atur waktu putaran (timer) 6. Tekan tombol mulai (start) agar platform mulai berputar dan menghomogenkan sampel 7. Matikan alat (OFF) dan cabut kabel setelah proses selesai serta ambil sampel dengan hati-hati.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			