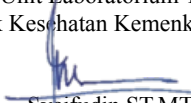


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman	: 1/2

IMAGIN 200 SN:20384	
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Imagin 200 SN:20384
Ruang Lingkup	Laboratorium Kimia Klinik - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.
Alat dan Bahan	1. IMAGIN 200 SN:20384
Fungsi	Melakukan pengujian secara kuantitatif pada kolesterol dalam serum dan plasma manusia
Instruksi Kerja	1. Hubungkan alat dengan sumber listrik 2. Nyalakan alat IMAGIN 200 dan tunggu hingga siap digunakan 3. Siapkan sampel pasien dan reagen ke dalam tabung yang sesuai dengan spesifikasi alat 3. Masukkan sampel ke dalam mesin. Alat akan secara otomatis melakukan pencampuran (Automatic Mixing). 4. Alat akan mengatur waktu inkubasi dan pembacaan (Timing & Testing) secara otomatis. 5. Tunggu hingga hasil kuantitatif muncul pada layar tampilan alat atau cetakan hasil analisis.
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.
Rekaman Mutu	-
Referensi	Buku manual penggunaan alat

VERIFIKASI	
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Poltekkes Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syarifudin ST.MT NIP. 197408012001121003	